



Virex® II 256

Desinfetante hospitalar para superfícies fixas e artigos não críticos

Finalidade de Uso

Virex® II 256 é um limpador desinfetante para ambientes hospitalares formulado a base de quaternário de amônio 5ª geração. Virex® II 256 limpa e desinfeta em uma única etapa. Pode ser utilizado em diversas superfícies tais como: vinil, acrílico e outras superfícies plásticas, aço inox, alumínio, latão, cromo, cobre, laminados, vidros, entre outros. Virex® II 256 tem ação bactericida, fungicida e virucida.

Características / Benefícios

- Possui ação bactericida (testado frente aos microrganismos *Staphylococcus aureus*, *Salmonella choleraesuis*, *Escherichia coli*, *Pseudomonas aeruginosa*, *Enterococcus hirae*, *Acinetobacter baumannii*, *Klebsiella pneumoniae*), fungicida (testado frente aos microrganismos *Trichophyton mentagrophytes*, *Candida albicans*, *Candida auris* e *Aspergillus niger*) e virucida (testado frente aos microrganismos Avian influenza, Adenovírus tipo 2, Rotavírus, HIV-1, Herpes simplex tipo 1 e 2, HBV e HCV).
- Por ser super concentrado, oferece excelente relação custo por litro diluído;
- Por ser à base de Quaternário de Amônio não é prejudicial à saúde das pessoas e ao meio ambiente.

Modo de usar

Para limpeza e desinfecção de superfícies fixas em uma única etapa: Aplicar solução a 0,39% (1:256), deixando em contato por 10 minutos. Deixar secar ao ar ou enxaguar, se necessário. **Para desinfecção de artigos não críticos:** Lavar previamente o artigo, enxaguar e secar. Aplicar a solução a 0,39% (1:256), deixando em contato por 10 minutos. Enxaguar e secar. Utilizar o mais breve possível.

Características Físico-Químicas

Aspecto	Líquido Límpido
Cor	Incolor
Peso específico a 25°C	0,99 - 1,01
pH puro	9,5 - 10,5
Teor do Quaternário	16,5 - 17,5

Os valores apresentados acima são dados típicos de uma produção normal e não devem ser considerados como especificação.

Composição

Cloreto de didecil dimetil amônio (8,70% p/p), Cloreto de alquil dimetil benzil amônio (8,19% p/p), sequestrante, tensoativo anfótero, agente de controle de pH e água.

Princípio Ativo

Cloreto de didecil dimetil amônio (8,70% p/p) e Cloreto de alquil dimetil benzil amônio (8,19% p/p)

Precauções de Uso

Recomendações sobre manuseio, estocagem e descarte do produto são fornecidas separadamente na Ficha Individual de Segurança de Produto (FISPQ).

Prazo de Validade

24 meses a partir da data de fabricação.

Registros Oficiais

Registro MS – 3.2661.0302